

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 2 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：100035
作業年月日	平成 29 年 2 月 21 日	作業時間：Hr
顧客名	恵庭カー病院様	TEL：0123-34-1155
所在地	恵庭市福住町1丁目6-6	ご担当 北川様
販売店	ロックメディカル(株)	ご担当 山田様
納入年月日	平成 22 年 6 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
1/1 消毒時給水異常 (E:202)

不具合原因、作業内容

定期点検
消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 330
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 交換 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。

装置情報	交換後運転回数：423	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：3177	殺菌/消毒+7L：6491
	リークチェック：9	自己洗浄：1563	アルコール単独：209	エア単独：123

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ガン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ガン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	チューブ		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 2 月 21 日

ご署名

北川

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者



Ver.3.1