

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1558
発行日：平成29年5月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300841
作業年月日	平成29年5月23日		作業時間： / Hr
顧客名	長沼内科消化器科 様		TEL：0123-82-5333
所在地	夕張郡長沼町西町1丁目8-16		ご担当 宮本 様
販売店	(株) 竹山		ご担当 若山 様
納入年月日	平成28年3月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
異常履歴なし

不具合原因、作業内容

定期点検
消耗部品の交換

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 446
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
		清掃 ☐			
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺ファブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。
次回メンテナンスでマニホールド交換 Ver. 0207/703C

装置 情報	交換後運転回数：1570	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：3219	殺菌/消毒+7L：0
	リークチェック：3	自己洗浄：241	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	1
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	4
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	〃 鉗子側		☒	1
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成29年5月23日

ご署名 宮本 真穂子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者