

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 170529

納入先	新鋭工業株式会社 札幌支店 殿			機種	ONW-10
所在地	北海道旭川市三条通 13-581-1			機番	000771
ユーザー名	小倉医院 様			納入日	平成 17 年 7 月 27 日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 29 年 4 月 26 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 29 年 5 月 25 日

修理依頼・不具合内容

「給水量不足」異常

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

「給水量不足」異常の原因である 水位センサを交換いたしました。
この部品と、性能が劣化した部品を交換して復旧しました。

No.1～3：吸着筒、吸湿筒

No.4：水位レベルセンサー、チューブ



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.44～0.63 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.4 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.085～0.146 MPa（AC100V 50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
- 運転カウンタ・・・458

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	PSA吸着筒、吸湿筒	1 式	PSA；酸素発生装置
2	ドレンフィルタ	1 個	
3	水位レベルセンサー	3 本	
4	排水シリコンチューブ	1 本	今回無償

承認



審査



作成

H29. 5. 29
中澤