

保守点検・修理 報告書

管理 No.

830

発行日：平成 29 年 10 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100291
作業年月日	平成 29 年 10 月 25 日		作業時間： / Hr
顧客名	札幌セントリ-病院 様		TEL：011-871-1121
所在地	札幌市白石区栄水元町5条3丁目5-10		ご担当 様
販売店	ロフティカル (株)		ご担当 松田 様
納入年月日	平成 28 年 / 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

異常履歴：殺菌時給水量異常 (E:202)

不具合原因、作業内容

保守点検作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 596
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.20 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレ-	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。

Ver. 0103 / Tol. A

装置 情報	交換後運転回数：1665	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：5314	殺菌/消毒+7L：4677
	リークチェック：2	自己洗浄：1212	7Lコ-ル単独：269	エア単独：33

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

129 年 10 月 25 日

ご署名

天野

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者



Ver.3.1