

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1102
発行日：平成30年2月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100793
作業年月日	平成 30 年 2 月 14 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	札幌中央病院 様		TEL：011-661-2111
所在地	札幌市西区豊栄5条6丁目10-1		ご担当 佐藤 様
販売店	(株)北成Xデカル		ご担当 野坂 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
内部より水モレ	
保守点検	
異常履歴：12/30 酸素圧力異常2 (E=200)	
不具合原因、作業内容	
排水栓の経年劣化が原因	
排水栓の交換	
定期交換部品の交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 893
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.21 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
その他問題はございません。	

装置情報	交換後運転回数： 34	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+7L： 187
	リークチェック： 192	自己洗浄： 2	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	排水栓		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	1730年 2 月 15 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	佐藤 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
宮 16.2.04 内	宮 16.2.04 内