

保守点検・修理 報告書

管理 No.

181931

発行日：平成 30 年 4 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100677
作業年月日	平成 30 年 4 月 4 日	作業時間：1 Hr
顧客名	三好内科胃腸科クリニック 様	TEL：0144-75-7711
所在地	苫小牧市豊川町3丁目6-1	ご担当 様
販売店	(株)竹山 苫小牧支店	ご担当 佐藤 様
納入年月日	平成 25 年 2 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検、吸水量不足 (13/13)
異常履歴：起動時給水異常 (E:201)

不具合原因、作業内容

吸水電磁弁の汚れによる詰まり
定期点検、消耗部品へ交換
吸水フィルター取付

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 349
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

交換後問題なく運転出来た。

Ver. 0105 / Tol. A

装置 情報	交換後運転回数：12	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：679	殺菌/消毒+7L：98
	リークチェック：657	自己洗浄：662	アルコール単独：628	エア単独：209

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	吸水電磁弁		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	吸水フィルター		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 4 月 4 日

ご署名

三好 孝宣

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者



Ver.3.1