

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1055
発行日：平成30年4月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300176
作業年月日	平成30年4月17日		作業時間： / Hr
顧客名	森内科胃腸科医院 様		TEL：0125-32-3455
所在地	余市郡仁木町北町1丁目6-2		ご担当 様
販売店	株)梅川医科器械店		ご担当 平川 様
納入年月日	平成26年3月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検 異常履歴なし			
不具合原因、作業内容			
定期点検、消耗部品の交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 340
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 交換 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題ありませんでした。 Ver. 0204 / T02BV			

装置情報	交換後運転回数：621	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：1000	殺菌/消毒+7L：1957
	リークチェック： /	自己洗浄：43	7Lコールド：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		1430 年 4 月 17 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 佐藤 拓子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
	