

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年 2月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号	300775	
作業年月日	平成 30 年 2月 28日		作業時間	1 Hr	
顧客名	元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック 様		TEL	011-783-5100	
所在地	札幌市東区北25条東20丁目7-1		ご担当	様	
販売店	(株)常光 札幌		ご担当	増子 様	
納入年月日	平成 28 年 1 月 27 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 439
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 229	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 75	殺菌/消毒+7L： 390
	リークチェック： 458	自己洗浄： 0	7Lコールド： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

30 年 2 月 28 日

ご署名 野口 玲子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者 作業者

本間