

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成30年 3 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒					製造番号：	300527		
作業年月日	平成	30	年	3	月	23	日	作業時間：	Hr
顧客名	北美原クリニック							TEL：	0138-34-6677
所在地	函館市石川町350-18							ご担当 山田事務長 様	
販売店	株式会社アクト 函館営業所							ご担当 林 様	
納入年月日	平成	27	年	4	月	1	日	保証期間	内 □ 外 ☒
作業区分	保守点検	☒	総合点検	□	年	回目	定期点検シール記入	□	
	出張・引取	修理	□	点検のみ	□	その他	修理表示貼付	□	

不具合状況、依頼内容、異常履歴									
不具合原因、作業内容									
点検項目									
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒						
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒						
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 □	ハ ¹ 取数 481					
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒						
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒						
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒						
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.7 / ppm					
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒						
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒						
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒						
殺菌槽コネクタ	正常 □	マニホールド周辺チューブ	正常 □	インコンボース40部 X 27部					
	□		□	" 220mm X 1 部					

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
約3年の内におかげさまで2000回以上使用。その為、内部配管ホース類と交換致しました。

装置情報	交換後運転回数：	688	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：	2143	殺菌/消毒+7L：	0
	リークチェック：	1	自己洗浄：	4	7Lコル単独：	0	エア単独：
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			□	
オゾンセンサー		☒	1			□	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山田 事務長 印
H30年 3 月 23 日

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752
責任技術者	
作業者	山田 事務長