

点検・修理報告書

管理 No. 20536
発行日: 2021年1月25日

クラスBオートクレープ IC C ave			
作業年月日	2021/1/22		作業時間: 8 Hr
顧客名	平和歯科クリニック 様		TEL:
所在地	北海道札幌市西区平和2条1丁目1-12		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100364	運転回数: 2573回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. 黒い画面（大気圧ゼロ設定）が頻繁に出る。		
2. ドアが開きづらい。		
原因		
1. 圧力センサのずれや故障のないことを確認しました。また、工場では黒い画面（圧力ゼロ設定）が出ることはありませんでした。以上により、お客様においては、気象変動により圧力が変化したと考えられます。		
2. ドアの固さ、開閉状態はスムーズであり、異常がないことを確認しました。運転終了後に若干負圧が残っている場合があります。負圧が残っていると、開きづらくなります。		
処置、作業内容		
1. 気象変動による圧力変化に対応できるように、プログラムを変更いたしました。		
2. 運転終了後に数秒待ってからドアを開くようにしていただくと、よいと思います。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 2 月 3 日

ご署名 宮田 祥子 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	宮田	三宅
'21/01/25	'21/01/25	'21/01/25