

保守点検・修理 報告書

管理 No.

94517

発行日：平成30年 9 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100293
作業年月日	平成 30 年 9 月 4 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	さっぽろ二十四軒病院 様	TEL： 011-641-2281
所在地	北海道札幌市西区二十四軒2条4丁目7-10	ご担当 木村様 様
販売店	(株) ムトウ	ご担当 小野塚 様
納入年月日	平成 24 年 4 月 9 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル起動しない

不具合原因、作業内容

タッチパネルの故障

カラータッチパネルに交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 456
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検を実施しました。特に問題はございません。

Ver00107/T03D

装置 情報	交換後運転回数：	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：	殺菌/消毒+7L：
	リークチェック：	自己洗浄：	7Lコールド：	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
カラータッチパネル		☒	1				

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者



Ver.3.1