

保守点検・修理 報告書

管理 No. 181932
発行日：平成30年 9月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300620
作業年月日	平成 30年 9月 13日		作業時間: Hr
顧客名	平田博己内科クリニック 様		TEL: 0138-48-2200
所在地	旭川市七重浜4丁目27-40		ご担当 丸山 様
販売店	(有)エー・エス・エフ		ご担当 福居 様
納入年月日	平成 27年 8月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検 異常履歴: 8/14 酸素圧力異常 2 (E=200)			
不具合原因、作業内容			
定期点検 消耗部品の交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 293
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題ありませんでした。 Ver.0207 / T02C			

装置 情報	交換後運転回数: 555	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌/消毒: ☒	殺菌/消毒+7L: 1425
	リークチェック: ☒	自己洗浄: ☒	7L単独: ☐	エア単独: ☒

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	1830年 9月 13日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 丸山 昌子	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者