

保守点検・修理 報告書

管理 No.

18147

発行日：平成30年11月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号	801024	
作業年月日	平成30年11月6日		作業時間	1 Hr	
顧客名	寿形病院 様		TEL	0123-37-3737	
所在地	恵庭市島松仲町1丁目4-11		ご担当	様	
販売店	株式会社 エルシーエー 札幌支店		ご担当	様	
納入年月日	平成28年10月18日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
異常履歴：19消毒時給水量異常(E=202)

不具合原因、作業内容

定期点検、消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 573
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません

Ver. 0207/T03C

装置 情報	交換後運転回数： 195	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 177	殺菌/消毒+7L： 219
	リークチェック： 28	自己洗浄： 0	7L単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成30年11月6日

ご署名 森田 予加子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

