

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1809-2

発行日：平成 30 年 11 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 10559
作業年月日	平成 30 年 11 月 28 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	町立引海病院 様		TEL: 0153-75 231
所在地	胆付郡引海町引海西本町103番地9		ご担当 山崎 様
販売店	株式会社 XILFO		ご担当 佐藤 様
納入年月日	平成 24 年 9 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検、異常履歴なし			
不具合原因、作業内容			
定期点検、消耗部品の交換、2ヶ所の交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 283
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題ありませんでした。			

装置情報	交換後運転回数: 636	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 636	殺菌/消毒+7L: 1309
	リークチェック: 2+	自己洗浄: ☒	7L単独: 1	エア単独: 9

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	2ヶ所の交換		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
 北海道札幌市東区北七条東4-28-3
 TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
宮 181128 内	宮 181123 内