

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成30年 10 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐				製造番号： 100587
作業年月日	平成 30 年 10 月 25 日				作業時間： 1.5 Hr
顧客名	山城消化器科内科クリニック				TEL： 0138-47-7011
所在地	函館市美原5丁目19-2				ご担当 院長 様
販売店	株式会社スズケン 函館支店				ご担当 大和 様
納入年月日	平成 24 年 10 月 22 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	殺菌時給水量常×4	
不具合原因、作業内容	管内問題 ございせん	

点検項目		殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺ファング	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐ 経年の腐食交換

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	管内問題 ございせん	流量転回数 2593回
----------------------------	------------	-------------

装置情報	交換後運転回数： 937	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 1396	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 21	自己洗浄： ☒	7Lコールド： 0	エア単独： 1193

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤	34個	☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3		
	TEL：011-741-7752		

