

保守点検・修理 報告書

管理 No. 181840
発行日：平成30年11月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 500687
作業年月日	平成 30 年 11 月 15 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	若浜医院 様		TEL: 011-561-6767
所在地	札幌市中央区南7条西17丁目1-5		ご担当 様
販売店	ロフマテカル(株)		ご担当 根田 様
納入年月日	平成 27 年 11 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
異常履歴なし

不具合原因、作業内容

定期点検 消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 558
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした
活性炭フィルター交換済

Ver. 0207/TT02c

装置 情報	交換後運転回数: 345	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 10	殺菌/消毒+7L: 999
	リークチェック: 1	自己洗浄: 84	アルコール単独: 0	エア単独: 624

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	活性炭フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

中村

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

