

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 / 年 6 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：800713
作業年月日	令和 平成 1 年 6 月 20 日		作業時間：1 Hr
顧客名	宮村内科医院 様		TEL：0138-65-5151
所在地	星田郡七飯町本町3丁目10-45		ご担当 様
販売店	(有)ユーミック		ご担当 福居 様
納入年月日	平成 27 年 11 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
異常履歴：1/29 酸素圧力異常2 (下：200)

不具合原因、作業内容

定期点検、消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 677
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はございません。

Ver. 0207 / T02C

装置情報	交換後運転回数：200	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：15	殺菌/消毒+7L：607
	リークチェック：606	自己洗浄：15	アルコール単独：0	エア単独：15

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：フューズ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 6 月 20 日

ご署名 花田 繁美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
富 19.6.20 内	富 19.6.20 内

Ver.3.1