

保守点検・修理 報告書

管理 No.

19944

発行日:

19 年 8 月 28 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 201183 作業年月日 19 年 8 月 28 日 作業時間 / Hr
顧客名	屋代沼診療所 様	TEL: 0153-86-2625
所在地	野付郡別海町屋代沼潮見町213-4	ご担当 様
販売店	(株)XILP	ご担当 佐藤 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検、
異常履歴なし

不具合原因、作業内容

定期点検、消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 482
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 02.07/TAOC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ございませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 47	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒 103/13	殺菌/消毒+7L: 103/13
	リークチェック: 50	自己洗浄: 79	7L単独: 1	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No.		
オゾンセンサー	☒	1
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ: 水槽側	☒
接続コネクタ: チューブ側	☒
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 1
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

19 年 8 月 28 日

大隅

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者