

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和元年 9 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □				製造番号：	300155
作業年月日	令和 元 年 9 月 9 日				作業時間：	1.5 Hr
顧客名	南郷医院				TEL：	011-861-0351
所在地	〒003-0023 札幌市白石区南郷通12北1-25				ご担当	院長 様
販売店	株式会社竹山 市内営業支店				ご担当	様
納入年月日	平成 25 年 11 月 29 日	保証期間	内 □ 外 □			
作業区分	保守点検	総合点検	□	年 回目	定期点検シール記入	□
	修理	□	点検のみ	□	修理表示貼付	□
出張・引取						

不具合状況、依頼内容、異常履歴

停電 ×3 O2圧力異常 ×1

オゾン水生成減速 ×1

" 異常 ×1

不具合原因、作業内容

水質(赤サビ)が気になる。フィルター交換が必要に感じている(有料)

点検項目	殺菌槽 LED	正常	異常
フタロック	正常	正常	正常
酸素ライン	正常	正常	正常
アルコーラライン	正常	正常	正常
オゾンセンサ	正常	正常	正常
給水ライン	正常	正常	正常
濃度計流量	正常	正常	正常
水位センサ	正常	正常	正常
水漏れ確認	正常	正常	正常
清掃	正常	正常	正常
トレー	正常	正常	正常
殺菌槽コネクタ	正常	正常	正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

機体耐用年数は5年です

定期点検は毎年12月25日(予定)

特記事項ありせん

総運転 1488回

装置情報	交換後運転回数：	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	76	殺菌/消毒+7L：	833
	リークチェック：	588	自己洗浄：	0	7Lコール単独：	1
				エア単独：	0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換	数量
ポン分解触媒		正常	1	正常	3
排水栓		正常	1	正常	2
ポン水濃度計		正常	1	正常	2
ポン水濃度計用フィルタ		正常	1	正常	2
オゾンセンサ		正常	1	正常	2

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 9 月 9 日

札幌市白石区南郷通12丁目北1番25号

医療法人社団 南郷医院

ご署名 医師 柳 莊 一郎

電話 (86) 貴任技術管 (861) 作薬管

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3
	TEL：011-741-7752
	吉田