

保守点検・修理 報告書

管理 No. 191018
発行日: 平成 1 年 10 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300365
作業年月日	令和 1 年 10 月 18 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	愛育病院 様		TEL: 011-563-2211
所在地	札幌市中央区南 4 条西 25 丁目 2-1		ご担当: 盛 様
販売店	ブック×ティカル (株)		ご担当: 新田 平 様
納入年月日	平成 26 年 10 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検 異常履歴: 10/2 酸素圧力異常 2 (E:200)			
不具合原因、作業内容			
定期点検、消耗部品の交換 排水ドレンバルブ ASSY の交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 8.55
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1516 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 4095	殺菌/消毒+7L: 3041
	リークチェック: 6810	自己洗浄: 127	7L単独: 113
		エア単独: 18	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	排水ドレンバルブ ASSY		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	19 年 10 月 18 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	 印
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
	