

保守点検・修理 報告書

管理 No. 191321

発行日：平成 28 年 5 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300842
作業年月日	令和 2 年 5 月 13 日		作業時間：1 Hr
顧客名	釧路中央病院 様		TEL：0154-31-2111
所在地	釧路市黒金町8丁目3		ご担当 様
販売店	特) 413 釧路支店		ご担当 加藤 様
納入年月日	平成 28 年 6 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 保守点検
 異常履歴：3.1. 酸素圧力異常 (E=200)

不具合原因、作業内容
 定期点検 消耗部品の交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 777
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 特に問題ありません。
 Ver. 0207 / T02C

装置情報	交換後運転回数：460	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：17	殺菌/消毒+7L：1333
	リークチェック：12	自己洗浄：63	アルコール単独：0	エア単独：3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
 2019 年 5 月 13 日
 CE科 芳賀博嗣 (印)
 ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
 北海道札幌市東区北七条東4-28-3
 TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
富 19.5.13 内	富 19.5.13 内