

保守点検・修理 報告書

管理 No.

19/050

発行日:

平成 1 年 7 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300252
作業年月日	平成 1 年 7 月 25 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	西沢内科胃腸科クリニック 様		TEL: 011-784-2340
所在地	札幌市北 16 条 東 16 丁目 1-13		ご担当 様
販売店	株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 6 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
異常履歴: 1/4 酸素圧力異常 (E-200)

不具合原因、作業内容

定期点検、消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 349
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺フューズ	正常	☒
		☐			☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。

Ver. 0204 / 702B/V

装置 情報	交換後運転回数: 593	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 2256	殺菌/消毒+7L: 2388
	リークチェック: 5/39	自己洗浄: 243	アルコール単独: 313	エア単独: 72

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; フューズ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R1 年 7 月 25 日

ご署名

西沢正明

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

