

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和2年 2 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒					製造番号： 100038
作業年月日	令和 2 年 2 月 13 日					作業時間： 1.5 Hr
顧客名	札幌朗愛会病院					様
所在地	札幌市豊平区月寒西1条10丁目3-30					ご担当 数下 様
販売店	ロックメディカル株式会社					ご担当 様
納入年月日	平成 22 年 9 月 21 日	保証期間	内 □ 外 ☒			
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	年 回目	定期点検シール記入 □		
	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □		
出張・引取						

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① オゾン水生成装置 × / 消毒時給水異常 × 2
② オゾン水生成装置 × /

不具合原因、作業内容

④ 関連が頻繁に出るようになったらお知らせする

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 4.39
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ □	マニホールド周辺ファング	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

水槽内の状態が良好です

運転稼働計 5348回

装置 情報	交換後運転回数： 705	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 1564	殺菌/消毒+7L: 2976
	リークチェック: 769	自己洗浄: 5	7Lコール単独: 31	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤	31	☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ、水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ、チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ、ホース		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R 2 年 2 月 13 日

ご署名 土橋 静子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL : 011-741-7752

責任技術者	作業者
	吉田