

保守点検・修理 報告書

管理 No.

191756

発行日:

19 年 9 月 11 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 100285 作業年月日 19 年 9 月 11 日 作業時間 / Hr
顧客名	山田クリニック 様	TEL: 0146-43-0008
所在地	北海道新ひだか町静内旭町1丁目	ご担当 下川 様
販売店	(株)スズケン	ご担当 栗 様
納入年月日	19 年 7 月 5 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
異常履歴なし

不具合原因、作業内容

定期点検 消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 640
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラム バージョン	正常 ☒ Ver. 0107 /

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ございません。

装置 情報	交換後運転回数: 90	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 75 /	殺菌/消毒+7L: 866.1
	リークチェック: 885	自己洗浄: 8/2	7Lコル単独: 3	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No.		
オゾンセンサー	☒	1
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 1
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

19 年 9 月 11 日

ご署名 真下 安子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

