

保守点検・修理 報告書

管理 No. 191206
発行日: 19 年 9 月 18 日

販売名 / サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 30112 作業年月日 19 年 9 月 18 日 作業時間 / Hr
顧客名	石橋胃腸病院 様	TEL: 011-872-5811
所在地	札幌市白石区川下 4丁目2-1	ご担当 様
販売店	ロックスデカル (株)	ご担当 数下 様
納入年月日	19 年 5 月 15 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
保守点検 異常履歴: 7/18 酸素圧入異常 2 (E=200)	
不具合原因、作業内容	
定期点検 消耗部品の交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 538
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0207 / T03C
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
特に問題ございません。	

装置 情報	交換後運転回数: 1189	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1125/	殺菌/消毒+アル: 1172/
	リークチェック: 0	自己洗浄: 84	アルコール単独: 6	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No.		
オゾンセンサー	☒	1
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 1
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

19 年 9 月 18 日

ご署名 向山 崇 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者