

保守点検・修理 報告書

管理 No. 191132
発行日: 平成 30 年 11 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300313
作業年月日	令和 元年 11 月 22 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	愛育病院 様		TEL: 011-563-2211
所在地	札幌市中央区南4条西25丁目2-1		ご担当 様
販売店	ロックスデカル(株)		ご担当 糸田 様
納入年月日	平成 26 年 10 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
異常履歴 なし

不具合原因、作業内容

定期点検, 消耗部品の交換

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 411
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ございません

Ver. 0205

装置情報	交換後運転回数: 1475	更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 13/9	殺菌/消毒+7L: 4545
	リークチェック: 5328	自己洗浄: 148	7Lアルコール単独: 98/1	エア単独: 37

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	1
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	1
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 11 月 22 日

ご署名 成 希子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
宮 19.11.22 内	宮 19.11.22 内