

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 8 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 0ED-1000S Plus					製造番号: 500373
作業年月日	2	年	8 月	26 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	札幌センチュリー病院					様
所在地	札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10					
販売店	ロックメディカル株式会社					
納入年月日	2019	年	9 月	12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理	☐	点検のみ	☐	その他	☐ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/13 原水汚水異常

4/10 " 限定異常

1/30-2/3 " 汚水異常

不具合原因、作業内容

水質の劣化、水質関連のトラブル発生に因立ちます。

点検項目	水槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	
水位センサ	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	
水槽側コネクタ	正常 ☐	
運転プログラムバージョン	正常 ☒	
Ver.	0302/T11A	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ございません

運転総計 2889 回

交換後運転回数: 1641	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 1435 / 消毒 (洗剤洗浄回数): 18
消毒 + アル (総運転回数): 1156	消毒 + アル (洗剤洗浄あり): 18	
リークチェック: 0	自己洗浄: 279	7%アルコール単独: 18
		エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1
交換後 No.			排水栓	☒	1
オゾンセンサ	☒	1	接続コネクタ: チューブ 倒	☐	
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1
				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R2 年 8 月 26 日

ご署名 木通尚美 印

修理業者	新鋭工業 株式会社	札幌支店
責任技術者		
作業者		

北海道札幌市東区北七条東4-28-3

TEL: 011-741-7752