

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日： 令和2年 9 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒				製造番号： 300775
作業年月日	令和 2 年 9 月 17 日				作業時間： 1.5 Hr
顧客名	元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック 様				TEL： 011-783-5100
所在地	札幌市東区北25条東20丁目7-1				ご担当 様
販売店	株式会社常光 札幌支店				ご担当 石澤 様
納入年月日	2016 年 1 月 27 日	保証期間	内 ☒ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	年 <u>4</u> 回目	定期点検シール記入 □	
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

11/27 O₂圧力異常 (E:200)

12/30 消毒槽異常 (E:101)

1/24 濃度制御注意 (E:109)

不具合原因、作業内容

定期交換部品の交換作業

点検項目	殺菌槽 LED	正常
フタロック	☒	正常 ☒
酸素ライン	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 0.68
オゾンセンサ	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 473 ppm
水漏れ確認	異常音、振動	正常 ☒
清掃	電源コード	正常 ☒
トレー	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	マニホールド周辺ファープ	正常 □
		□

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特記事項 2366 回

装置情報	交換後運転回数： 329	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 220	殺菌/消毒+7L： 881
	リークチェック： 1084	自己洗浄： 177	7Lコール単独： 3	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 9 月 17 日

ご署名 菅原 智美 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752	責任技術者	作業者
			吉田