

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和2年 3 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒				製造番号：	301441	
作業年月日	令和 2 年 3 月 23 日					作業時間：	1.5 Hr
顧客名	ふるげん内科循環器クリニック				様	TEL：011-872-0088	
所在地	札幌市白石区北郷2条4丁目3-5				ご担当	小川	様
販売店	ロックメディカル株式会社				ご担当		様
納入年月日	平成 30 年 3 月 22 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品			
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 2 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	消毒時給排水異常(E:202) x 3	
不具合原因、作業内容	下記の通り定期交換部品の作業を行いました。	

点検項目	殺菌槽	LED	正常	殺菌槽	LED	正常
フタロック	正常 ☐			エアライン		正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒			オゾン水濃度計動作		正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒			排水栓、排水ライン		正常 ☒ バルブ数 708
オゾンセンサ	正常 ☒			細管送水ライン		正常 ☒
給水ライン	正常 ☒			排気ライン		正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐			オゾン濃度		正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水位センサ	正常 ☒			異常音、振動		正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒			電源コード		正常 ☒
清掃	正常 ☒	清掃 ☐		殺菌チューブ類		正常 ☒
トレー	正常 ☒			マニホールド周辺ファブ		正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒					☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特記事項

装置情報	交換後運転回数：	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：	111	殺菌/消毒+7L：	425
	リークチェック：	3 /	自己洗浄：	0	7Lコール単独：	0
					エア単独：	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名
院長 吉田 宗一郎
札幌市白石区北郷2条4丁目3-5
医療法人社団 北郷メディカルビル3F
ふるげん内科循環器クリニック
〒060-0888 札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

吉田