

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 2 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500422
作業年月日	令和 3 年 2 月 26 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	さとう内科医院 様		TEL： 0136-22-6122
所在地	虻田郡倶知安町北2条西2丁目18		ご担当 様
販売店	株式会社北海メディカル		ご担当 飯田 様
納入年月日	2019 年 10 月 4 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>	R3年 1回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴
レベルセンサ異常 E=214 1回 排水異常 E=40/ 1回
排水注意 E=111 1回
オゾン水生成注意/異常 5回

不具合原因、作業内容
下記の定期交換部品の交換作業

点検項目	
フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	水槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ナル数 709
オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	消毒 チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水槽側コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	運転プログラムバージョン 正常 <input type="checkbox"/> Ver.0302 / TUA

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
問題ございません
運転総回数 842回

装置情報	交換後運転回数： 309 更新 (別紙) 実施・未実施	消毒 (総運転回数)： 376 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 374	
	消毒+アル (総運転回数)： 0	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 0	
	リークチェック： 23/	自己洗浄： 7	7Lコル単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	<input checked="" type="checkbox"/>	1	オゾン分解触媒	<input checked="" type="checkbox"/> 1	吸盤	<input checked="" type="checkbox"/> 3
交換後 No.			排水栓	<input checked="" type="checkbox"/> 1	エアフィルター	<input type="checkbox"/>
オゾンセンサー	<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続ホコリ、チューブ側	<input type="checkbox"/>	水フィルター	<input checked="" type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/>		オゾン水濃度計用フィルタ	<input checked="" type="checkbox"/> 1		<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

お客様ご確認署名欄	R3 年 2 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 高橋	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
 北海道札幌市東区北七条東4-28-3  
 TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者