

点検・修理報告書

管理 No. 210435
発行日: 2021/10/8

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年9月29日			作業時間:	Hr
顧客名	きたざわ矯正歯科 様			TEL:	011-864-1876
所在地	北海道札幌市白石区南郷通1丁目北1-1 白石メディカルビル3階			ご担当	様
販売店	札幌歯科器材㈱ 鈴木様			ご担当	様
納入年月日	2020 年 9 月 4 日	保証期間	内 ■ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100461	運転回数:		
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー2 洗浄槽満水					
原因					
洗浄槽満水を検知するセンサーの位置が反応しやすい位置になっていたため。					
処置、作業内容					
フロートセンサーの位置調整。					
水量の設定値の再設定。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。					
			2021 年 10 月 28 日		
			ご署名 北澤 印		

修理業者

株式会社 IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/09/29 菊池	サービスG '21/09/29 小山	サービスG '21/09/29 佐藤