

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日：令和 3 年 4 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □				製造番号：	301441
作業年月日	令和 3 年 4 月 1 日	作業時間：1.5 Hr				
顧客名	ふるげん内科循環器クリニック				様	
所在地	札幌市白石区北郷2条4丁目3-5				ご担当	様
販売店	ロックメディカル株式会社				ご担当 数下	様
納入年月日	2018 年 3 月 22 日	保証期間	内 □ 外 □	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □	年	回目	定期点検シール記入	□	
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付	□	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	持に孔	
不具合原因、作業内容		

下記の定期交換部品の交換作業

点検項目	殺菌槽 LED	正常
フタロック	☒	正常 ☒
酸素ライン	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	異常音、振動	正常 ☒
清掃	電源コード	正常 ☒
トレー	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	カビ予防のため
持に孔	「消毒ナール」運転後は自己洗浄にお使い下さい
	Ver. 0207/703C 運転確認 8/17 回

装置情報	交換後運転回数：228	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：155	殺菌/消毒+70L：609
	リークチェック：51	自己洗浄：0	70L単独：0	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2021 年 4 月 1 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	古堅宗範 印

修理業者	新鋭工業 株式会社	札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3			吉田
	TEL：011-741-7752			