

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和2年 9 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒					製造番号： 300863
作業年月日	令和 2 年 9 月 8 日					作業時間： 1.5 Hr
顧客名	佐野内科医院					様
所在地	札幌市中央区南5条西15丁目1-6					様
販売店	ロッキメディカル株式会社					様
納入年月日	2016	##	年 6 月 29 日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ	☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	8/20 消毒時給排水異常(E:202) x 3回
不具合原因、作業内容	定期交換部品の作業

点検項目		殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 475
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサ	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺ファブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		□

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	特記事項：問題ございません Ver. 0207/2020 運転記録 1085回
---------------------------	--

装置情報	交換後運転回数： 177 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 445	殺菌/消毒+PL： 621
	リークチェック： 16	自己洗浄： ☒ 2	7Lコール単独： 0 エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒	1	吸盤	3入	☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	—
ガン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	—
ガン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	—
オゾンセンサ		☒	1			☐	—

お客様ご確認署名欄	令和2年 9 月 8 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	佐野内科医院
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 院長 佐野 公隆 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3		吉田
	TEL：011-741-7752		