

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和2年 9 月 14 日

|       |                                                                                                                        |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                  | 製造番号： 100034      |
| 作業年月日 | 令和 2 年 9 月 14 日                                                                                                        | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 内科胃腸科クリニック長尾医院 様                                                                                                       | TEL： 011-861-4696 |
| 所在地   | 札幌市白石区本通 1 1 南 1-9                                                                                                     | ご担当 様             |
| 販売店   | ロックメディカル有限会社                                                                                                           | ご担当 山田 様          |
| 納入年月日 | 2010 ### 年 6 月 18 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>                                         | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>         |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2/26 原水汚水異常 (E=209)  
6/24 殺菌時給水異常 (E=209)

不具合原因、作業内容

ポンプ用圧力調整器PSSのポンプバネ交換  
定期交換部品の交換作業

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 749    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 若くもれあり                      | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

液晶画面の寿命が近づいています(別料金)

運転総計 936 回

|      |                            |            |               |
|------|----------------------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 50 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌/消毒： 293 | 殺菌/消毒+7L： 629 |
|      | リークチェック： 12 自己洗浄： 2        | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤 3個        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 9 月 14 日

ご署名

長尾

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北七条東4-28-3  
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

吉田