

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和2年 11 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒										製造番号： 300365
作業年月日	令和 2 年 11 月 27 日										作業時間： 1.5 Hr
顧客名	菊郷会 愛育病院										様
所在地	札幌市中央区南4条西25丁目2-1										様
販売店	ロクメディカル株式会社										様
納入年月日	2014 年 10 月 3 日		保証期間		内 □ 外 □						
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年	回目	定期点検記入 ☐				
	修理	☐	点検のみ	☐	その他	☐	修理表示貼付 ☐				
出張・引取											

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/3 消毒時給水異常 E:202
8/27 オゾン水生成異常 E:110
8/27 E:207

不具合原因、作業内容

エゾポンプの性能低下 (別料金) 240 分

保守点検の交換作業、カビ予防の為、排水フィルターの撤去

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 348
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒ 汚水 清掃時期
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒ 73 音ヤナ
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ファープ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

7月4日撤去したのび子取りみせに付

運転記録計 1829/回

装置情報	交換後運転回数： 1579	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 5300	殺菌/消毒+7L: 3826
	リークチェック: 8716	自己洗浄: 265	7Lコール単独: 165	エア単独: 19

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 27 日

ご署名 成 田 希子 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

吉田