

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日： 令和2年 11 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒				製造番号： 300081
作業年月日	令和 2 年 11 月 19 日	作業時間： 1.5 Hr			
顧客名	たかすぎ腎泌尿器科 様				TEL： 011-775-1233
所在地	札幌市北区北區篠路2条6丁目4-30				ご担当 岩澤 様
販売店	北海道イナカシ				ご担当 岩澤 様
納入年月日	2013 年 11 月 28 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
	出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特にございません

不具合原因、作業内容

下記の定期保守パックの交換作業を行いました

点検項目		殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 896
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.12 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒ も手元にてお求めたい
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

購入から7年、クッキーパネル画面にて2箇所がみえます。実機的な画面のフリーズ又は消失の恐れあり。（別料金）

還報総計2223回

装置情報	交換後運転回数： 307	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 222 /	殺菌/消毒+777： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0	777コール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

2020 年 11 月 19 日

ご署名 山崎 江里 印

責任技術者 作業者 吉田

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

Ver.3.1