

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和 3 年 2 月 2 日

|       |                                              |        |       |     |            |                   |
|-------|----------------------------------------------|--------|-------|-----|------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S □ |        |       |     |            | 製造番号： 300713      |
| 作業年月日 | 令和 3 年 2 月 2 日                               |        |       |     |            | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 宮村内科医院                                       |        |       |     |            | TEL： 0138-65-5151 |
| 所在地   | 亀田郡七飯町本町3丁目10-45                             |        |       |     |            | ご担当 福井社長 様        |
| 販売店   | 有限会社ユーミック                                    |        |       |     |            | ご担当 福井社長 様        |
| 納入年月日 | 2015 年 11 月 27 日                             | 保証期間   | 内 □   | 外 □ | 付属品        |                   |
| 作業区分  | 保守点検 □                                       | 総合点検 □ | 年     | 回目  | 定期点検記録記入 □ |                   |
| 出張・引取 | 修理 □                                         | 点検のみ □ | その他 □ |     | 修理表示貼付 □   |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/14 消毒時給水異常 (E:202)

Q: 排水ホースのカビが気になる

A: 「消毒+アルコール」運転の都度 自己洗浄をオフトします

不具合原因、作業内容

下記の定期交換部品の交換作業

| 点検項目     | 殺菌槽 LED | 正常 |
|----------|---------|----|
| フタロック    | 正常      | 正常 |
| 酸素ライン    | 正常      | 正常 |
| アルコールライン | 正常      | 正常 |
| オゾンセンサ   | 正常      | 正常 |
| 給水ライン    | 正常      | 正常 |
| 濃度計流量    | 正常      | 正常 |
| 水位センサ    | 正常      | 正常 |
| 水漏れ確認    | 正常      | 正常 |
| 清掃       | 正常      | 正常 |
| トレー      | 正常      | 正常 |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常      | 正常 |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

水槽内はとてまあ好

特に問題ございせん

運転総計 1715回

|      |              |                  |            |               |
|------|--------------|------------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 230 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒： 24  | 殺菌/消毒+7L: 828 |
|      | リークチェック： 829 | 自己洗浄： 23         | 7Lコール単独： 0 | エア単独： 11      |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換 | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換 | 数量 |
|--------------|-------|----|----|--------------|-------|----|----|
| オゾン分解触媒      |       | ☑  | 1  | 吸盤           |       | ☑  | 1  |
| 排水栓          |       | ☑  | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | ☑  | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | ☑  | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | ☑  | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | ☑  | 1  |              |       | ☐  |    |
| オゾンセンサ       |       | ☑  | 1  |              |       | ☐  |    |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

R3 年 2 月 2 日

|      |                    |      |       |     |
|------|--------------------|------|-------|-----|
| 修理業者 | 新鋭工業 株式会社          | 札幌支店 | 責任技術者 | 作業者 |
|      | 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 |      |       | 吉田  |
|      | TEL：011-741-7752   |      |       |     |