

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 3 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500873
作業年月日	2021 年 3 月 9 日		作業時間	1 Hr
顧客名	札幌センチュリー病院 様		TEL	011-871-1121
所在地	札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10		ご担当	様
販売店	ロックメディカル(株)		ご担当	数下 様
納入年月日	2019 年 9 月 12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	2 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 748
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302/T11A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

完了

装置 情報	交換後運転回数：1629 更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒（総運転回数）：2457 / 消毒（洗剤洗浄あり）：0	
	消毒+アル（総運転回数）：1764	/ 消毒+アル（洗剤洗浄あり）：0	
	リークチェック：0	自己洗浄：441	アルコール単独：27

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 51908251			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

樋口尚美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者 作業者

本間