

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 4 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐					製造番号：	100359
作業年月日	令和 3 年 4 月 7 日					作業時間：	1.5 Hr
顧客名	ささなみ内科クリニック					様	
所在地	江列市野幌町66-2					TEL：011-382-3373	
販売店	株式会社スズケン メディカル推進課					ご担当	院長 様
納入年月日	2012 年 3 月 2 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐				
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/6 レバセンサー異常 E:214
4/6 オゾンポンプ異常 E:205

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☒ 236
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

前日の保守が2017/3実施
運転点検(3326日) Ver.0107/701A 経年により画面の消滅の可能性

装置情報	交換後運転回数：	605 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：	201	殺菌/消毒+7L：	1368
	リークチェック：	193 自己洗浄：	110	7Lコール単独：	1	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752	ご署名 印	
		責任技術者	作業者
			吉田