

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日：令和 3 年 4 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐				製造番号：100173
作業年月日	令和 3 年 4 月 13 日				作業時間：1.5 Hr
顧客名	おんねや診療所				TEL: 01574-5-2340
所在地	北見市留辺蘂町温根湯温泉440-1				
販売店	三好メディカル(株)				ご担当 様
納入年月日	2011 年 3 月 29 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	ご担当 様	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
8/30 酸素圧力異常 (E:200)

不具合原因、作業内容

下記の定期交換部品の交換作業

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒	
清掃	清掃 ☐	
トレー	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題ございません。本体環境は良好です
Ver. 0107/TO1A 運転総計 49 回
オゾン濃度計 0 Lot/51811054

装置情報	交換後運転回数：	0	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：	38	殺菌/消毒+7L：	0
	リークチェック：	0	自己洗浄：	0	7Lコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 13 日

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752	ご署名	責任技術者	作業者
				吉田