

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:令和 3 年 7 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐				製造番号:	100587
作業年月日	令和 3 年 7 月 20 日				作業時間:	1.5 Hr
顧客名	川添消化器内科クリニック					TEL: 0138-47-7011
所在地	函館市美原5丁目19-2					ご担当 事務長 様
販売店	株式会社スズケン 函館支店					ご担当 大和 様
納入年月日	2012 年 10 月 22 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 ☒ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

光量低下異常 E:108 12回

給水異常(起動時/殺菌時) 9回

不具合原因、作業内容

下記の定期交換部品の交換作業

1L-6価部 ¥22500 税別

点検項目	殺菌槽 LED	正常	殺菌槽 LED	正常
フタロック	正常	正常	正常	正常
酸素ライン	正常	正常	エアライン	正常
アルコールライン	正常	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	正常	排気ライン	正常
水位センサ	正常	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	正常	電源コード	正常
トレー	正常	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常	正常	マニホールド周辺チューブ	正常
	正常	正常		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

経年劣化 交換的正面面故障のリスクがございませう (別料金)

Ver. 0.05/70LA 運転総計 4967 回

装置情報	交換後運転回数:	1243	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 2639	殺菌/消毒+7L:	0
	リークチェック:	2	自己洗浄: ☒ 2	7Lコール単独:	0	エア単独: 2324

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計	6.1/18113420	☐		接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 院長 川添 一哉

年 月 日

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者		作業者	吉田
北海道札幌市東区北七条東4-28-3					
TEL: 011-741-7752					