

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 令和 3 年 11 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号: 300081
作業年月日	令和 3 年 11 月 2 日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	たかすぎ腎泌尿器科 様	TEL: 011-871-1121
所在地	札幌市北区篠路2条6丁目4-30	ご担当 様
販売店	(株)北海メディカル	ご担当 岩澤 様
納入年月日	2013 年 11 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特にございません

不具合原因、作業内容

下記の定期交換部品の交換作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 618
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒ 圧力 315 kPa
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒ ポンプ音あり
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

プラステック経年劣化の時期に入ってきた、トレイの破損等にご注意下さい
Ver. 0204/T04C 運転総計 2523 回

装置情報	交換後運転回数: 298	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 2520	殺菌/消毒+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒 LOT/	52106025	☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 11 月 2 日

ご署名

吉田

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者 作業者

吉田