

保守点検・修理 報告書

発行日: 令和 3 年 11 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒				製造番号: 300687
作業年月日	令和 3 年 11 月 16 日				作業時間: 1.5 Hr
顧客名	わかばま医院				TEL: 011-561-6767
所在地	札幌市中央区南7条西17丁目1番5号				ご担当 根田 様
販売店	ロクメディカル(株)				ご担当 根田 様
納入年月日	2015 年 11 月 6 日 保証期間 内 □ 外 ☒				付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	年 回目	定期点検シール記入 □	
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

停電 (E: 403) x1

不具合原因、作業内容

下記の定期交換部品の交換作業 & 活性炭 2kg-交換

点検項目	殺菌槽 LED	正常
フタロック	☒	正常
酸素ライン	☒	正常
アルコールライン	☒	正常
オゾンセンサー	☒	正常
給水ライン	☒	正常
濃度計流量	☒	正常
水位センサー	☒	正常
水漏れ確認	☒	正常
清掃	☒	正常
トレー	☒	正常
殺菌槽コネクタ	☒	正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

背面下に水もれ跡、但し機械内部からの漏れではありません
水質センサー硬質部から水跡あり。Ver.0207 To2C 運転合計 4088 回

装置情報	交換後運転回数: 291	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 20	殺菌/消毒+7L: 1896
	リークチェック: 1	自己洗浄: 1541	7Lコール単独: 1	エア単独: 629

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒	10090387	☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 16 日

ご署名 中村 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3		吉田
	TEL: 011-741-7752		