

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和3年 12 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	製造番号： 300086
作業年月日	令和 3 年 12 月 2 日	作業時間： / Hr
顧客名	町立別海病院 様	TEL： 0153-75-2311
所在地	北海道野付郡別海町別海西本町103-9	ご担当 様
販売店	(株)メルプ	ご担当 佐藤 様
納入年月日	2013 年 11月 20日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴  
 定期保守

不具合原因、作業内容  
 保守点検、部品交換

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> ハル数 565
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺フューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項  
 特に問題ありません。

装置情報	交換後運転回数： 454	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 122 /	殺菌/消毒+アル： 386 /
	リークチェック： 118	自己洗浄： 28	アルコール単独： 7	エア単独： 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；水槽側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；フューブ側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄  
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日  
 ご署名 加瀬 めぐみ 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
 北海道札幌市東区北七条東4-28-3  
 TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
	本間