

保守点検・修理 報告書

発行日： 2021 年 12 月 16 日

500373

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus					製造番号：	500423
作業年月日	令和 3 年 12 月 16 日					作業時間：	1.5 Hr
顧客名	札幌センチュリー病院					TEL：	011-871-1121
所在地	札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10					ご担当	様
販売店	ロケットデカレ					ご担当	様
納入年月日	2019 年 9 月 12 日		保証期間		内	外	定期点検シール記入
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年	回目	☐
出張・引取	修理	☐	点検のみ	☐	その他	☐	修理表示貼付

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/27 札幌力果常
6/9 消毒時給米果常
6/29 停電

6/28 7/16, 7/28 消毒槽果常 3回

不具合原因、作業内容

下記の定期交換部品の交換作業

点検項目	水槽 LED	正常 ☒
フタロック	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 878
アルコールライン	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	細管送水ライン	正常 ☒ 圧力 30.50k
給水ライン	排水ライン	正常 ☒
濃度計流量	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水位センサ	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	電源コード	正常 ☒
清掃	消毒 チューブ類	正常 ☒
トレー	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換しました
水槽側コネクタ	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302/T11A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

使用過剰の薬、配管の痛みが早いです。
消毒孔運転後の自己洗浄をこまめに。 Ver.0302/T11A 運転合計 6530回

装置 情報	交換後運転回数：	1632	更新 (レバド) 実施	未実施	消毒 (総運転回数)：	3359	消毒 (洗剤洗浄あり)：	無で使用
	消毒+アル (総運転回数)：	2494			消毒+アル (洗剤洗浄あり)：	無で使用		
	リークチェック：	0	自己洗浄：	637	70%アルコール単独：	40	エア単独：	0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	3
交換後 No.			排水栓	☒	1	エアフィルター	☒	1
オゾンセンサ	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☐		水フィルター	☒	1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1		☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R3 年 12 月 16 日

ご署名 阿部 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL : 011-741-7752

責任技術者

作業者