

# 修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号	04-20013	No. 210331
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 札幌支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	愛育病院様	機番	300365 (4号)
環営	所在地	北海道札幌市中央区南4条西25丁目2-1	納入日	2014年10月03日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2021年03月03日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年03月26日

## 修理依頼・不具合内容

各部点検・清掃

## 不具合原因 (故障箇所) と処置

### [1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

排水系統を中心に点検・清掃を実施しました。併せて定期部品も交換しました。

写真1: 定期交換部品

写真2: ドレンバルブ ASSY、パッキン

写真3: 排水ポンプ

写真4: 基板 ほか



### [2] 修理・点検内容

- 1: 部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2: オゾン水濃度測定 (規定値 $0.7 \pm 0.2$ ppm) : 0.71 ppm・正常
- 3: 出荷時の装置情報

交換後運転回数 450→0 殺菌: 5568、殺菌+アルコール: 4008、リークチェック: 9152  
自己洗浄: 319、アルコール単独: 175、エア単独: 20

承認
松 21.03.31 永
責任技術者
中 21.03.31 澤
作成
R03.3.31 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	ドレンバルブ ASSY	1	
2	排水ポンプ	1	
3	配管チューブ・パッキン	1	
4	基板、リークチェックコネクタ、プレート、キャップ	1	