

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

04-20014

No. 210331

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 札幌支店 殿		機種	OED-1000S
環営	環品	顧客名	愛育病院様		機番	300373 (5号)
		所在地	北海道札幌市中央区南4条西25丁目2-1		納入日	2014年10月03日
		点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2021年03月03日
計	3	返送先	納入先と同じ		出荷日	2021年03月26日

修理依頼・不具合内容

各部点検・清掃

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水系統を中心に点検・清掃を実施しました。併せて定期部品も交換しました。

写真1：定期交換部品

写真2：ドレンバルブASSY、パッキン

写真3：排水ポンプ、基板ほか



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数 1429→0 殺菌：1634、殺菌＋アルコール：5863、リークチェック：6842
自己洗浄：367、アルコール単独：1309、エア単独：94

承認

松
21.03.31
永

責任技術者

中
21.03.31
澤

作成

R03.3.31

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	ドレンバルブASSY	1	
2	排水ポンプ	1	
3	配管チューブ・パッキン	1	
4	基板、7スプレタ、プレート、キャップ	1	

(株) IHI アグリテック (旧社名 IHIハウラ)

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528

Ver3.1