

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 6 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301443
作業年月日	令和 3 年 6 月 24 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	手稲前田腎泌尿器科 様		TEL：011-215-6700
所在地	札幌市手稲区前田 2 条 13 丁目 3-18		ご担当 様
販売店	株式会社北海メディカル		ご担当 飯田 様
納入年月日	2018 年 5 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし

不具合原因、作業内容

下記の保守パック部品の交換作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

良好です。配管サビ予防のために今後継続的に「自己洗浄」を実施下さい。
Ver. 0207/T03C 運転総計 1645 回

装置情報	交換後運転回数： 303	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 366	殺菌/消毒+7L： 321
	リークチェック： 694	自己洗浄： 264	7Lアルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ、水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ、チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 24 日

ご署名

宮本 紀子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

吉田