

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 7 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒				製造番号： 300712
作業年月日	令和 3 年 7 月 15 日				作業時間： 1.5 Hr
顧客名	東神楽町国民健康保険診療所				様
所在地	上川郡東神楽町南1条西1丁目3-3				TEL：0166-83-2423
販売店	株式会社ムトウ旭川支店				ご担当 大橋 様
納入年月日	2015 年 11 月 25 日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	年 回目	定期点検シール記入 □
	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □	
出張・引取					

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

下記の定期交換部品の交換作業

点検項目		殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 738
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサ	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		□

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

配管カビが目立って果した。消毒＋アルコール運転の後、交換物にまめに目視洗浄を
して30分排水栓取外し効果有。Ver 0207/2020 取扱説明書 466 頁

装置情報	交換後運転回数： 35	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 10	殺菌/消毒＋7L： 242
	リークチェック： 206	自己洗浄： 5	7Lコール単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ガン水濃度計	401/6082435	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ガン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

23 年 7 月 15 日

ご署名 吉田 宣登 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3		吉田
TEL：011-741-7752			