

保守点検・修理 報告書

発行日:令和 3 年 10 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒					製造番号:	300863
作業年月日	令和 3 年 10 月 5 日					作業時間:	1.5 Hr
顧客名	佐野内科医院					様	
所在地	札幌市中央区南5条西15丁目					ご担当	院長 様
販売店	ロクメディカル (株)					ご担当	様
納入年月日	2016 年 6 月 29 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒			付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	特にありませんでした	
不具合原因、作業内容	下記の定期交換部品の交換作業	

点検項目		殺菌槽 LED	正常
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 678
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒ 圧力 295 ok
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	特に問題ございません。水槽内も清潔で良好です Ver.0207/702C 運転能率計 1356 回	
----------------------------	--	--

装置情報	交換後運転回数: 269	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 600	殺菌/消毒+7L: 736
	リークチェック: 16	自己洗浄: 2	7Lコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒 407	16062385	☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2021 年 10 月 5 日	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 山崎 多美子 印	

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3		吉田
	TEL : 011-741-7752		